

Características Gerais

Uso Pretendido

O produto é destinado para coleta, transporte e armazenamento de amostras clínicas (vírus, clamídia, micoplasma e ureaplasma). O uso do Swab é essencial para a realização do RT-PCR, considerado o teste padrão ouro para o diagnóstico laboratorial do novo coronavírus.

O Swab Prime Health está apto para a amostragem do tipo nasofaringe.

População de teste

Aplicável a toda população necessária de obtenção de diagnóstico através do swab.

Usuários Pretendidos

Médicos qualificados e enfermeiros para coleta de amostras em um laboratório médico ou hospital.

Componentes

Cada kit é composto por swab para coleta e tubo transporte contendo líquido conservante.

1. Swab (1 unidade);
2. Tubo Transporte com líquido conservante (1 unidade);
3. Manual de instruções (1 unidade).

Contra-indicação

O meio do produto não é ideal para preservação de bactérias, pois o próprio líquido conservante contém antibióticos que inibem a bactéria.

Armazenamento e Transporte

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original a temperatura de 4°C a 35°C. Para fins de transporte, o produto pode ser mantido em temperatura de até 40°C.

As amostras clínicas recém-coletadas devem ser inspecionadas o mais rápido possível ou transportadas em caixa térmica ou de isopor com gelo reciclável para o laboratório dentro de 48 horas e mantida nas temperatura entre 2°C e 8°C.

Após esse período, recomenda-se congelar a amostra pelo menos a -20°C.

FICHA TÉCNICA

Kit de Swab para Coleta e Tubo Transporte

Modelo: YS43131



**Produto
Certificado
Registro MS:
80772110011**



Visando oferecer as melhores opções para a linha de diagnóstico para Covid-19, a Prime Health apresenta o Kit de Swab para Coleta e Tubo Transporte. Tal instrumento é destinado para coleta, transporte e armazenamento de amostras clínicas (vírus, clamídia, micoplasma e ureaplasma).

O Swab Prime Health está devidamente registrado na Anvisa. Sendo assim, a sua segurança, qualidade e eficácia estão devidamente comprovadas.

Precauções

1. Este produto é um descartável, portanto é proibido reutilizá-lo. Após o uso, realize o descarte em local apropriado para materiais potencialmente contaminados;

2. Não utilizar o material se o invólucro individual estiver violado;

3. Verifique se o produto está dentro do período de validade. Caso não esteja, o seu uso não é indicado. Leia atentamente as instruções relevantes antes de usar e esteja familiarizado com as instruções e métodos de operação do produto;

4. Recomenda-se manusear os materiais destinados aos testes microbiológicos devidamente paramentado em local especificado para os mesmos.

Instruções de uso

O Kit Swab Prime Health é de uso exclusivo para coleta de amostra nas vias nasais. Confira abaixo como o seu uso deve ser realizado:

Swab nasofaringe

1. Esfregue suavemente a cabeça do swab nas passagens nasais;

2. Mergulhe a cabeça do swab no fluido de amostragem do tubo transporte;

3. Corte a haste do aplicador para que a tampa possa ser fechada de maneira adequada.

Fabricado por: Jiangsu Huaxia Ruitai Plastic Industry Co. Ltd

Endereço: Modern technology industry Zone, Jiangyan District, Taizhou, City
Tel.: 0523-88310598

Importado e distribuído por: Yin's Brasil
Comércio Internacional Ltda
CNPJ: 02.462.686/0001-68

Aut. Func. Ms.: 8.07.721-1
Resp.Técnico: Sannyo Alex Ferreira da Silva
CRF/RJ: 8515

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:
Tel.: (21) 3575-7900
E-mail: primehealth@yinsbrasil.com.br

FICHA TÉCNICA

Kit de Swab para Coleta e Tubo Transporte)

Modelo: YS43131

PRODUTO COM
CERTIFICAÇÃO
INTERNACIONAL

